

Montre Téléalarme ELYA

MEDIWALK®

Localisation en temps réel – Détecteur de chute – Alerte immobilisation –
Communication et bien plus. . . ,





Localisation en temps réel

À l'intérieur et à l'extérieur. Utilisez le Wifi et les balises Bluetooth Mediwalk pour une localisation intérieure précise, et le GPS pour l'extérieur.



Périmètres de sécurité personnalisables

Configurez des zones de sécurité pour recevoir des alertes immédiates si votre proche les franchit.



Bouton SOS :

Une pression sur ce bouton envoie une alerte d'urgence avec les détails de localisation complets.



Déviations d'itinéraire :

Définissez un itinéraire sur notre carte (votre espace), les rues, boulevards, avenues, si votre proche dévie de cet itinéraire, vous recevez une alerte.



Détecteur de chute :

Dès qu'une chute est détectée, vous recevez une alerte SMS et Courriel vers autant de personnes souhaitées, sans limitation. Lieu de la chute sur carte vous sera communiqué en instantané. Un appel est lancé automatiquement depuis la montre vers un numéro de votre choix.



Communication bidirectionnelle :

Permet des appels entrants et sortants, ainsi qu'une communication directe avec un centre de surveillance d'urgence grâce à un microphone et un haut-parleur



- Rythme Cardiaque
- Et nombre de pas

- **Design élégant et intuitif :**

Dotée d'un écran tactile, cette montre affiche l'heure, le rythme cardiaque, et le nombre de pas en temps réel.

- **Notifications avancées :**

Recevez des alertes par SMS, notifications sur Smartphone et e-mail vers un nombre illimité de référents.

- **Sans abonnement :**

Tous les services annexes sont proposés sans abonnement ni limitation dans le temps.

- **Accessibilité :**

Gérez la localisation et les paramètres depuis un espace privé sur ordinateur ou via l'application dédiée Mediwalk pour iOS ou Android.

- **Connexion 4G LTE :**

Supporte diverses bandes 4G, avec basculement sur 3G/2G en l'absence de couverture 4G.

- **Rappels programmables :**

Envoyez des rappels pour la prise de médicaments, hydratation, ou en cas d'inactivité prolongée.

- **Étanche IP67 :**

Portez-la sous la douche sans risque ; une chute déclenche immédiatement une alerte d'assistance.

- **Prérequis :** Une carte SIM au format nano avec un minimum de 6 Mo de données par mois.

Personnalisez l'apparence de votre montre

Selon vos goûts. Plusieurs interfaces disponibles directement accessibles depuis la montre : **mode numérique moderne** ou **classique à aiguilles**.





- Notre **Bracelet verrouillable** est spécialement conçu pour les patients atteints d'Alzheimer.

Fermeur de Sûreté Mediwalk®

Conçu spécifiquement pour garantir **la sécurité des personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles apparentés**, le fermeur de sûreté Mediwalk est un dispositif breveté, robuste et facile à installer, qui équipe les montres téléalarme GPS Mediwalk.

Fabrication et Brevet : Ce fermeur est entièrement développé et fabriqué sous brevet Mediwalk en France, assurant une qualité et une fiabilité supérieures.

Sécurité Renforcée : Le fermeur Mediwalk est conçu pour prévenir les risques de fugue en empêchant le détachement accidentel ou intentionnel du bracelet de la montre. Cette fonction est cruciale pour les utilisateurs ayant tendance à errer ou à se désorienter, minimisant ainsi le risque de les perdre ou de les exposer à des situations dangereuses.

Facilité d'utilisation : Malgré sa robustesse, ce fermeur est conçu pour être facile à manipuler par les aidants ou les personnels soignants, permettant une mise en place et un retrait simple et rapide, sans compromettre la sécurité de l'utilisateur.

Esthétique et Personnalisation : Disponible en plusieurs coloris – noir, orange, blanc, rouge, bleu, il permet une personnalisation selon les préférences de l'utilisateur ou pour correspondre à la couleur du bracelet, combinant fonctionnalité et style.

Spécialement bénéfique pour les personnes souffrant d'Alzheimer, ou maladies apparentées ce fermeur contribue à maintenir une continuité dans la surveillance et le suivi grâce à la montre GPS, tout en respectant le confort et la dignité de l'individu.

En choisissant le fermeur de sûreté Mediwalk, vous optez pour une solution sécurisée et élégante, réduisant efficacement le risque d'incidents.



Plateforme de Géo Sécurité Mediwalk®

Découvrez la plateforme de géo-sécurité Mediwalk, un espace privé et dédié conçu pour offrir une surveillance en temps réel **sans abonnement ni limitation de durée**. Cette solution innovante permet une localisation précise et continue de vos proches, en toute simplicité.

Accès Facile et Universel : Utilisez un ordinateur, ou téléchargez l'application Mediwalk pour mobile et tablette, et localisez votre proche à tout moment. Notre plateforme est conçue pour être intuitive et accessible, permettant à tout utilisateur de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités.

Surveillance en Temps Réel : La localisation en temps réel garantit que vous pouvez toujours savoir où se trouve votre proche, augmentant ainsi la tranquillité d'esprit pour vous et la sécurité pour eux.

Périmètres de Sécurité Personnalisables : Configurez des périmètres de sécurité directement sur la carte. Si votre proche entre ou sort de ces zones définies, vous recevez une alerte immédiate, vous permettant de réagir rapidement en cas de besoin.

Alertes et Réseau de Surveillance : Ajoutez des alertes personnalisées et désignez des référents qui recevront ces notifications. Vous pouvez organiser un réseau de surveillance fiable autour de votre proche, impliquant famille, amis ou soignants, pour une couverture complète et efficace.

Espace Privé et Sécurisé : Votre plateforme est un espace privé où les données sont protégées. Vous et les personnes autorisées pouvez accéder aux informations de localisation et aux configurations sans compromettre la confidentialité ou la sécurité.

Intuitif et Engageant : Avec une interface utilisateur conçue pour la facilité d'utilisation, Mediwalk rend la gestion de la sécurité géographique non seulement efficace mais également agréable.

Caractéristiques Technique

Catégorie	Spécifications
Modèle	ELYA
Dimension	46.9mm × 41.5mm × 15.4mm
Poids	56g
Batterie de secours	600mAh Lithium Polymère
Tension de charge	5V DC
Température de fonctionnement	-20°C à +80°C (utilisation) -30°C à +70°C (stockage)
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 48 heures en utilisation normale
Imperméabilité	IPX7
Capteur	Capteur de mouvement et de vibration
Connecteurs	4 broches - Aimant pour la charge
Emplacement carte SIM	Oui (Nano non incluse)
Mémoire flash	1 Mo
Microphone / Haut-parleur	Intégrés
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4G
Bluetooth (BLE)	BT5.0 LE
GPS - Chipset	Ubx M8130 (prise en charge AGPS)
Systèmes pris en charge	GPS et Glonass
Fréquence du récepteur	1575.42 MHz
Démarrage à froid	Environ 26s
Démarrage chaud	Environ 2s
Démarrage à chaud	Environ 1s
Antenne GPS	Antenne céramique intégrée
4G LTE - Bandes prises en charge	États-Unis : B2, B4, B12 UE : B1, B3, B7, B8, B20 Australie : B1, B3, B5, B7, B8, B28
Accessoires standards	1 Montre ELYA 1 Chargeur (prise UK/AU/EU/US au choix) 1 Manuel d'utilisation FR (par mail) 1 Base de chargement magnétique 1 Boîte d'emballage 1 Borne BLE pour l'intérieur



Types d'Alerte et Canaux de Notification

Type d'Alerte	SMS	Email	Notification	Appel vocal
SOS	✓	✓	✓	✓
Chute détectée	✓	✓	✓	✓
Alerte immobilisation	✓	✓	✓	
Déplacement motorisé	✓	✓	✓	
Entrée dans une zone	✓	✓	✓	
Sortie de zone	✓	✓	✓	
Déviation de trajet	✓	✓	✓	
Alerte batterie faible	✓	✓	✓	
Alerte Température	✓	✓	✓	

Coloris disponibles – Montre de téléassistance ELYA

La montre de téléassistance **Elya** est proposée en **deux finitions de boîtier** :

- **Noir**
- **Ivoire**

Elle est accompagnée d'un **bracelet interchangeable**, disponible en **plusieurs coloris** pour s'adapter aux préférences de l'utilisateur et offrir davantage de personnalisation.

Cette distinction permet de concilier **fonctionnalité, confort et esthétique**, tout en conservant la fiabilité du dispositif dans toutes ses versions.



Bracelet Kaki



Bracelet Bleu Encre



Bracelet Noir



Bracelet Rouge



Bracelet Blanc



Bracelet Mauve



Blanc et Noir



Montre Portée



Blanc et Kaki

Prise en charge et aides financières

L'acquisition d'une solution de téléassistance comme la montre **Elya** peut faire l'objet d'une **prise en charge partielle ou totale**, selon la situation de l'utilisateur.

Plusieurs dispositifs existent :

- **APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie)**, destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie
- **PCH (Prestation de Compensation du Handicap)** via la **MDPH**, pour les personnes en situation de handicap
- **Mutuelles et caisses de retraite**, qui peuvent proposer des remboursements ou forfaits dédiés à la téléassistance
- **Plans d'action sociale** ou **services à la personne** agréés, dans le cadre du maintien à domicile



Solutions de Géo Sécurité en faveur de personnes dépendantes depuis 2006

Amri World Trading

Mediwalk



1^{er} Concept de Téléassistance impliquant le réseau familial

Sans aucun abonnement !

229 Rue Solférino

59000 Lille (Fr)

 09 72 45 93 15

www.mediwalk.fr